



Москва, Походный проезд, д. 23,
Тел./факс (495)949-52-51, 948-01-34
www.tm-profi.ru

Руководство по эксплуатации.




Silver Fox
BEAUTY INSTRUMENT

Стерилизатор гласперленовый OT12

Технические характеристики

Напряжение питания 220 вольт 50гц

Потребляемая мощность 80 ватт

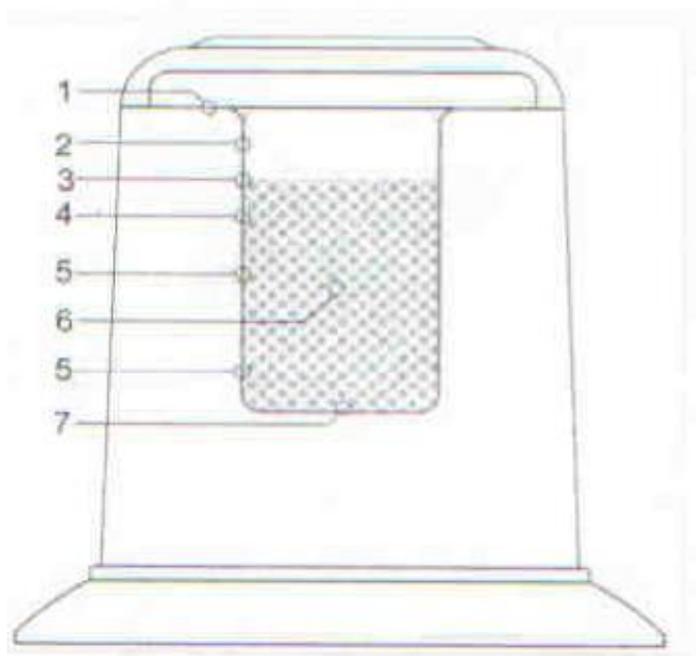

Распределение температуры по уровням.

1. температура 75 ± 3 С
2. температура 85 ± 3 С
3. температура 100 ± 6 С
4. температура 150 ± 10 С
5. температура 230 ± 40 С
6. температура 205 ± 5 С
7. температура 208 ± 8 С

Использование.

Подходит для использования в салонах красоты – для косметологии, педикюра и маникюра, - и дома.

Всего за 5 секунд стерилизует: щипцы, скальпель-держатели, зонды, шпатели, боры, иглодержатели, пинцеты, копыя и т.д.

Принцип действия основан на контакте стерилизуемых хирургических инструментов с маленькими стеклянными сферами, имеющими температуру 230 С.

Подготовка к работе.

1. Наполнить емкость гласперленовыми шариками, недосыпая до края емкости 5 мм.
2. Включите прибор в сеть. Красный сигнал указывает на то, что осуществляется процесс нагрева. Время нагрева 10-20 минут.
3. Инструменты, требующие стерилизации, погружают в гласперленовые шарики (после того, как они продезинфицированы и просушены).
4. По окончании работы выключите кнопку включения и выньте штекер из розетки.

ВНИМАНИЕ! Инструменты не должны контактировать со стенками емкости и дном.

Через 3-5 секунд инструменты извлеките из емкости и охладите с помощью антисептической жидкости.

При перемещении гласперленового стерилизатора с места на место крышка должна быть плотно закрыта.

По окончании работы выключите кнопку включения и выньте штекер из розетки.

.